


# Brustgurt

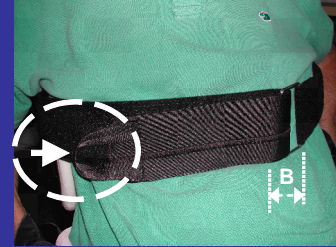

Selbst-abnehmbarer Brustgurt  
für Tetraplegiker

September 05

SPZ Nottwil 1

Maße:	Individuell
Material:	Flausch- und Hakenband
Materialquelle:	-
Materialpreis:	-
Herstellungszeit:	ca. 60 min
Herstellungskosten:	ca. Fr. 100.--
Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel:	Fa. Orthotec, Nottwil

## Beschreibung der Funktion:

Der Brustgurt verhindert ein Nach-Vorne-Kippen des Tetraplegikers. Der zweigeteilte Brustgurt mit speziell angefertigter Tetra-Schleufe und vergrößerter Schnalle „B“ an je einem Ende ermöglicht ein selbstständiges Öffnen/Schliessen des Gurtes. Die Schnalle wurde soweit vergrößert, dass eine Person mit eingeschränkter Fingerfunktion das andere Ende des Gurtes (mit Tetra-Schleufe) problemlos hindurch schieben und anschliessend fixieren kann. Der Gurt wird an den anderen beiden Enden am Rollstuhlrückenrohr befestigt (durch Hochschieben wegnehmbar).

Anfragen bei: [ergo.spz@paranet.ch](mailto:ergo.spz@paranet.ch)