


Raucherhilfe

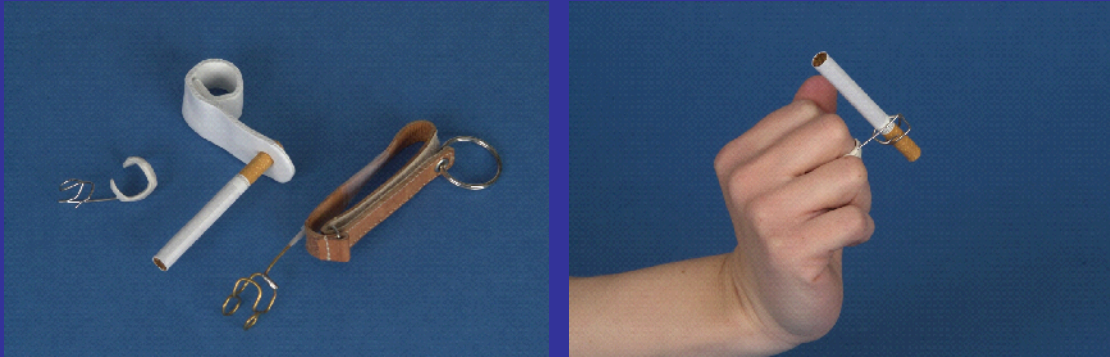

3 verschiedene Rauchhilfe
zum Fixieren in Tetraschlaufe oder zum Aufstecken auf Finger

Mai 05

SPZ Nottwil 1

Maße: -
Material: Schienenmaterialreste, Basteldraht oder aufgebogene Büroklammer
Materialquelle: Heimwerkerladen
Materialpreis: -

Herstellungszeit: 15 – 20 min.
Herstellungskosten: -

Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel: Eigene Herstellung
Beschreibung der Funktion: Sichere Fixierung einer Zigarette bei fehlender Fingerfunktion

Kurzanleitung zur Herstellung:

Schienenmaterial in heissem Wasser erwärmen und das Material entsprechend auf den Finger anpassen – je nach Modell der Rauchhilfe, entweder Loch für Zigarette einstanzen (z. B. mit Lochzange) oder bereits gebogener Draht in noch warmes und weiches Schienenmaterial eindrücken bzw. einlegen.

Den Basteldraht bzw. die Büroklammer mit verschiedenen Zangen so biegen, dass die Zigarette sicher damit fixiert werden kann. Soll der Draht in der Tetraschlaufe fixiert werden, muss das Ende der Rauchhilfe ausreichend lang sein, damit der Patient sich nicht mit der Zigarette verbrennen kann.

Anfragen bei: ergo.spz@paranet.ch
ZWJ