


Raucherhilfe

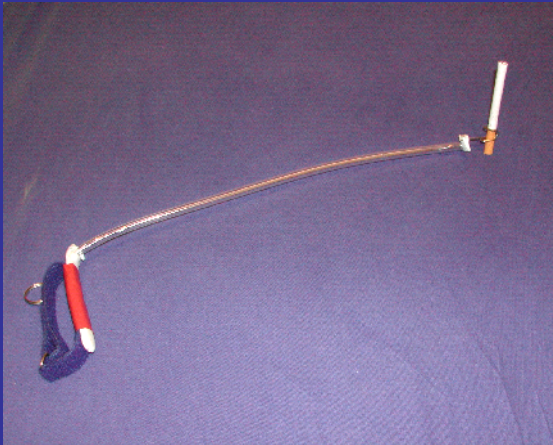

Rauchhilfe verlängert
zum Einstecken in eine Tetraschlaufe
bei schwach innervierter Schultermuskulatur

Mai 05

SPZ Nottwil 1

Maße: -
Material: Schienenmaterialreste, stabiler Draht, Büroklammer
Materialquelle: Heimwerkerladen
Materialpreis: -

Herstellungszeit: 30 min.
Herstellungskosten: -

Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel: eigene Herstellung
Beschreibung der Funktion: Rauchhilfe mit Verlängerung bei schwach innervierter
Schultermuskulatur, zum Einstecken in eine Tetraschlaufe

Kurzanleitung zur Herstellung:
Stabiler Draht auf richtige Länge abmessen plus Zugabe von ca. 8 cm für Fixierung in
Tetraschlaufe. Den Draht nach 8 cm um 90° biegen. Die 8 cm Draht mit erwärmten
Schienenmaterial umwickeln, so dass der Draht in der Tetraschlaufe gut fixiert ist.
Aus Büroklammer Halterung für die Zigarette biegen.
Mit einem Schienenrest den stabilen Draht und die Zigarettenhalterung verbinden.

Anfragen bei: ergo.spz@paranet.ch
ZWJ