

Schreibhilfe



Datum 25.06.2010

SPZ Nottwil 1

Maße: Länge 15cm, Breite 2cm.

Material: Thermoplastisches Material z.B. Ezeform.

Materialquelle:

Materialpreis:

Herstellungszeit: 20Minuten.

Herstellungskosten: Reststücke, ca. 2Fr.

Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel:

Beschreibung der Funktion: Schreibhilfe bei fehlender Finger- und Daumenfunktion.

Kurzanleitung zur Herstellung: 2cm breites 15cm langes Ezeformband zuschneiden. Im Schienenbad erhitzen. Weiches Band um Stift formen und oben zusammen drücken. Jeweils Schlaufenende um Daumen und Zeigefinger legen. Winkel von Schreiber einstellen. An der Hand erhärten lassen.

Anfragen bei: ergo.spz@paranet.ch