

Maße: Größe der Rückenlehne des Rollstuhls

Material: Warnweste für das Auto

Materialquelle: Baumarkt / Autozubehör / Sicherheit

Materialpreis: ca 3 € Herstellungszeit: ca 20 min

Herstellungskosten:

Bezugsquelle für kompl. Hilfsmittel: keine

Beschreibung der Funktion: Warnweste wird auf die Rückseite des

Rollstuhls geklettet um im Straßenverkehr (z.B. mit Handbike) rechtzeitig gesehen zu

werden.

Kurzanleitung zur Herstellung Aus dem Rückenteil die gewünschte Größe

ausschneiden, abnähen, zusätzliche Reflektionsstreifen aufnähen, Klett und

Flausch an die Weste und an die

Rückenlehne des Stuhls nähen und damit bei

Bedarf befestigen.

Anfragen bei: [ergo.rmv@bgu-murnau.de]