

Trinkhalter zu Navicularmanschette



Trinkhalterung für „Feierabendbier“ oder PET-Flasche
für Tetraplegiker

April 06

SPZ Nottwil 1

Maße:	--
Material:	Halter für PET-Flaschen
Materialquelle:	aus Velohandel
Materialpreis:	--
Herstellungszeit:	2h
Herstellungskosten:	Fr. 260.--
Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel:	Fa. Orthotec Nottwil

Beschreibung der Funktion:

Das Aufstecken des Trinkhalters auf die Navicularmanschette ermöglicht einer Person mit stark eingeschränkter bzw. passiver Funktionshand das selbstständige Trinken aus einer PET-Flasche oder wie abgebildet aus einer Bierflasche...

Kurzanleitung zur Herstellung:

Die Trinkhalterung wird von einer Hilfsperson in die extra angenähte Führung der Navicularmanschette gesteckt. Die beiden „Stützfüsse“ des Armbügels halten den Unterarm in der Neutral - Null - Position. Die Bier- und/oder PET-Flasche kann nun von einer Hilfsperson geöffnet und in die Halterung gestellt werden. Ein selbstständiges Trinken ist nun möglich.

Anfragen bei: ergo.spz@paranet.ch