


Öffner für Katheterverpackung

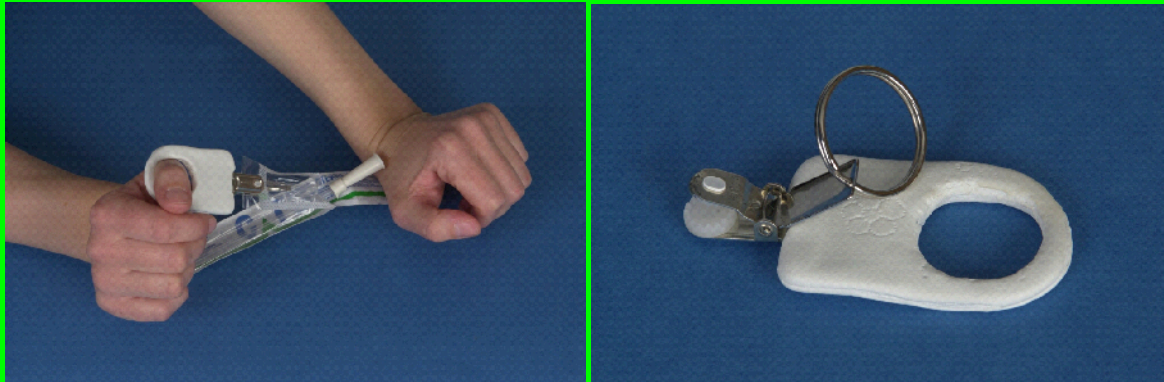

zum Öffnen von Katheterverpackungen bei eingeschränkter Fingerfunktion

April 05

SPZ Nottwil 1

Maße: -

Material: 1 kleines Stück Schienenmaterial (z.B. Ezeform)
1 Schlüsselring gross, 1 Klipse

Materialquelle: -

Materialpreis: -

Herstellungszeit: 20 min

Herstellungskosten: -

Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel: Eigenanfertigung

Beschreibung der Funktion: zum Öffnen von Katheterverpackungen bei eingeschränkter Fingerfunktion (siehe Bilder). Hilfsmittel an der Verpackung festklemmen und mit Daumen die Verpackung aufreissen.

Kurzanleitung zur Herstellung: Schienenmaterial gemäss Bild zurecht schneiden und bei entsprechender Temperatur formen. Klipse mit montiertem Schlüsselring in das weiche, geschmolzene Material hinein schieben und trocknen lassen

Anfragen bei: ergo.spz@paranet.ch