

# Beinspreizhilfe



Spreizkissen zum Fixieren der Beine  
beim Intermittierenden Selbstkatheterismus

BG - Unfallklinik Murnau

Maße: ca. 30 cm x 20 cm  
Material: Poresta 5 cm  
Materialquelle: Baumarkt  
Materialpreis: ca. 2 € / m<sup>2</sup>

Herstellungszeit: ca. 20 min  
Herstellungskosten:

Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel: keine

Beschreibung der Funktion :Spreizkissen wird zwischen die Beine geklemmt, damit die Beine beim ISK nicht durch die Spastik in eine andere Position gelangen können.

Kurzanleitung zur Herstellung: Grundform auf Poresta aufzeichnen, dann mit einem Teppichmesser die Grundform ausschneiden. Anschließend die Ecken verrunden. Damit sie glatt werden mit wenig Druck schneiden.

Anfragen bei: [ergo.rmv@bgu-murnau.de]