


Labienspreize

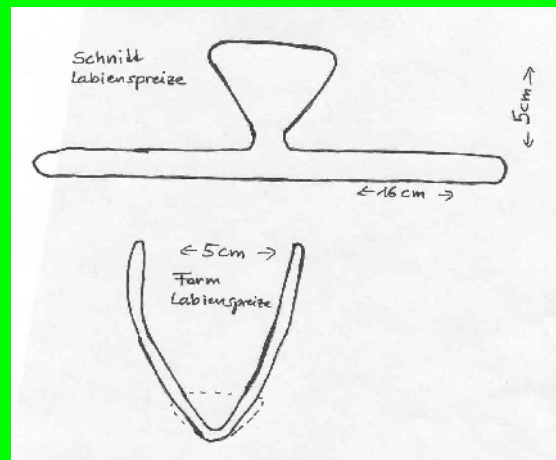

Kunststoff „V“ zum Spreizen der Labien

BG - Unfallklinik Murnau

Maße:	Länge 16 cm, Breite 5 cm (siehe Schnitt)
Material:	Polystyrol, Stärke 3 mm, oder PVC, 3mm
Materialquelle:	Polystyrol: Josef Weiss Plastic GmbH; Fichtenstr. 26; 85649 Hofolding; Tel: 08104/6605-3 PVC: Fa. Sahlberg; Friedrich-Schüle-Str.20, 85622 Feldkirchen/München, Tel:089/99135-0
Materialpreis:	Reste
Herstellungszeit:	ca. 15 min
Herstellungskosten:	
Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel:	keine
Beschreibung der Funktion:	Arme der Spreize werden zusammengedrückt, und positioniert, dann losgelassen, so spannt das „V“ die Schamlippen.
Kurzanleitung zur Herstellung	Material anzeichnen, aussägen, entgraten, mit Heißluftfön erhitzen und formen, Silikonschläuche als Polsterung aufstecken.
Anfragen bei:	Ergo-rmv@bgu-murnau.de]