

Spezielle Schiene



Dezember 2009

SPZ Nottwil 1

Maße: Individuell
Material: Neopren 2-3mm
Materialquelle:
Materialpreis:
Herstellungszeit: circa 1.5h
Herstellungskosten:

Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel: „Eigenbau...“

Beschreibung der Funktion:

Extension des IP von Dig. I bzw. Verkleinerung der Flexion des IP/Dig. I nach Ersatzoperation ohne New Zealand-Split oder ohne IP-Arthrodese

Kurzanleitung zur Herstellung:

1. Mass nehmen: ab –MCP bis Fingerkuppe Dig. I.
2. Sauber zuschneiden – möglichst gerade Linien / Flächen.
3. Mit Spezialleim für Neopren Längsseiten kleben.
4. Ca. 1cm breiter Extension-Streifen, ca. halb so lang wie Daumenschiene zuschneiden.
5. Extensionsstreifen auf die ganze Länge der geklebten Neoprenschiene – auf die Klebnaht – aufkleben. Damit wird der Extensionszug erzeugt. Stärke des Zuges kann individuell gestaltet werden. (Streifenlänge, Aufklebe-Modus).

Anfragen bei: ergo.spz@paranet.ch