
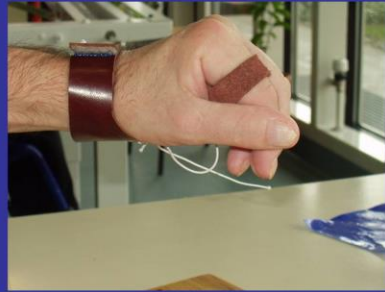


# Ulnaris-Lederschleife

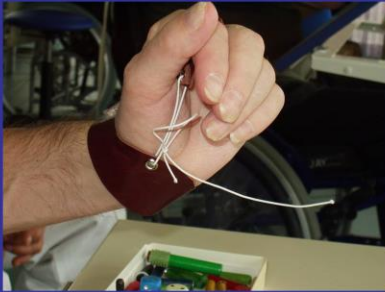

Durch Lederschleife und Gummizügel besserer Halt der Funktionshand

BG – Unfallklinik Murnau

Maße: je nach Hand ca 22 cm x 4,5 cm

Material: Leder, Gummiband, Klettverschluss, Flauschband, Ösen

Materialquelle:

Materialpreis: Reste

Herstellungszeit: ca 20 min

Herstellungskosten:

Bezugsquelle für kompl. Hilfsmittel: keine

Beschreibung der Funktion: durch den Gummizug (der variabel zu verstellen ist) kann der Zug auf den Finger verstellt werden. Der Greifeffekt wird besser und eine bessere Kraftübertragung (z.B. Schreiben mit einem Kugelschreiber) ist möglich.

Kurzanleitung zur Herstellung

Lederband fürs Handgelenk und Lederschleife für die Finger ausschneiden, mit Ösen versehen, Klett und Flausch auf die Enden des Handgelenkbandes nähen und einen Gummi in die Ösen einziehen und spannen

Anfragen bei: [ergo.rmv@bgu-murnau.de]