

Warnweste



Warnweste für den Rollstuhl

BG – Unfallklinik Murnau

Maße:	Größe der Rückenlehne des Rollstuhls
Material:	Warnweste für das Auto
Materialquelle:	Baumarkt /Autozubehör/ Sicherheit
Materialpreis:	ca 3 €
Herstellungszeit:	ca 20 min
Herstellungskosten:	

Bezugsquelle für kompl. Hilfsmittel: keine

Beschreibung der Funktion: Warnweste wird auf die Rückseite des Rollstuhls geklettet um im Straßenverkehr (z.B. mit Handbike) rechtzeitig gesehen zu werden.

Kurzanleitung zur Herstellung: Aus dem Rückenteil die gewünschte Größe ausschneiden, abnähen, zusätzliche Reflektionsstreifen aufnähen, Klett und Flausch an die Weste und an die Rückenlehne des Stuhls nähen und damit bei Bedarf befestigen.

Anfragen bei: [ergo.rmv@bgu-murnau.de]